




PIC Sow Body Condition Caliper Instructions

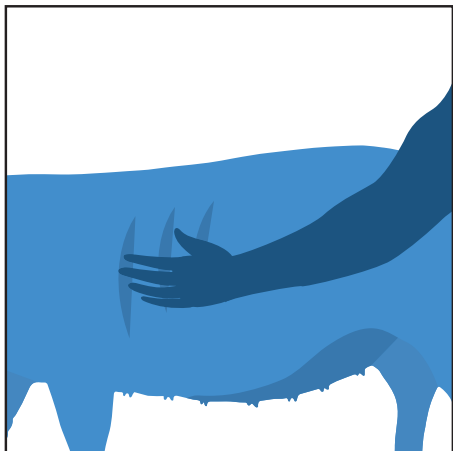

1. Once the sow is standing, use your fingertips to locate her ribcage along her side.

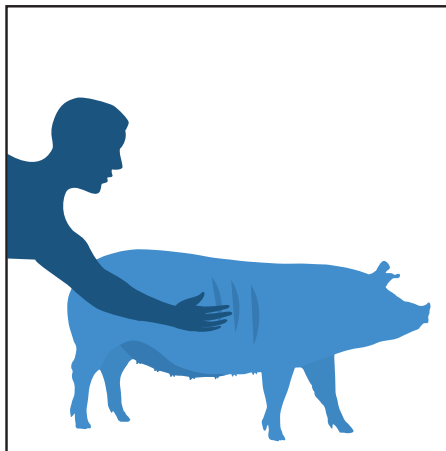


2. Slowly move your hand across her ribs until you locate the last rib. You'll feel a soft spot, indicating you have reached the end of her ribcage.

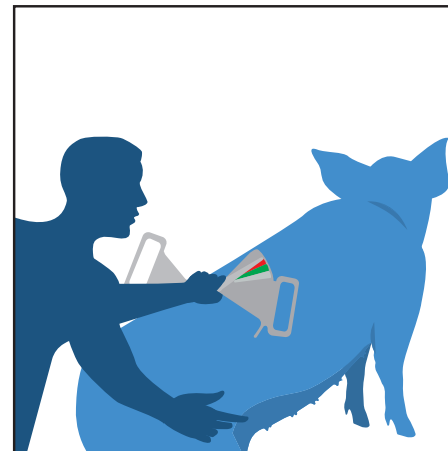


3. Once you have located the last rib, align the center bolt of the caliper with the sow's spine at the last rib.



4. Hold the caliper with one hand around the bolt, and let the tips of the caliper just touch the skin of the sow. **Do not press the tips of the caliper into the sow.**

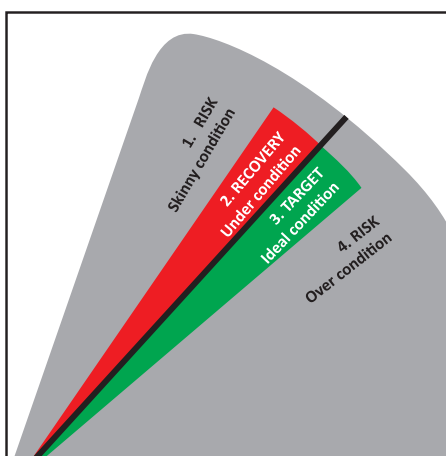

5. Read and record caliper measurements.

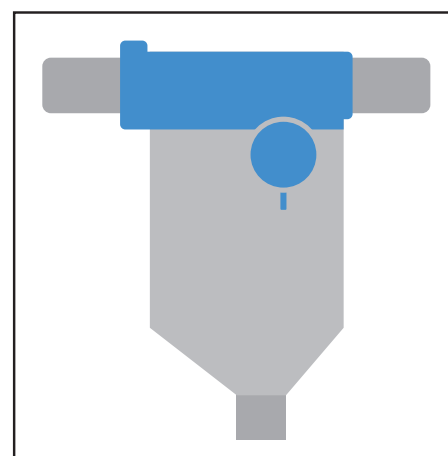


6. Adjust feeding using the PIC feeding program recommendations.




Scan for
Instructional Video


Instrucciones para usar el calíper de condición corporal de cerdas PIC

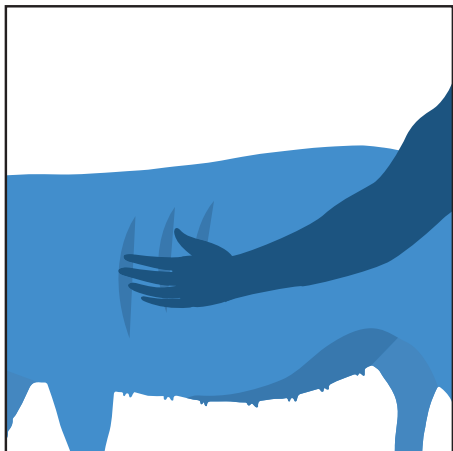

1. Una vez que la cerda esté de pie, use la punta de los dedos para ubicar las costillas a lo largo del costado de la hembra.

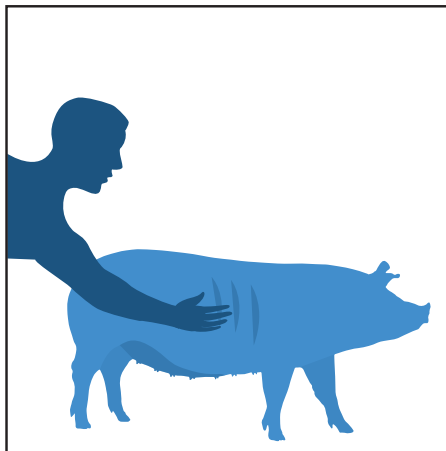


2. Mueva lentamente su mano por sus costillas hasta localizar la última costilla. Sentirás un punto blando, lo que indica que has llegado al final de su caja torácica.

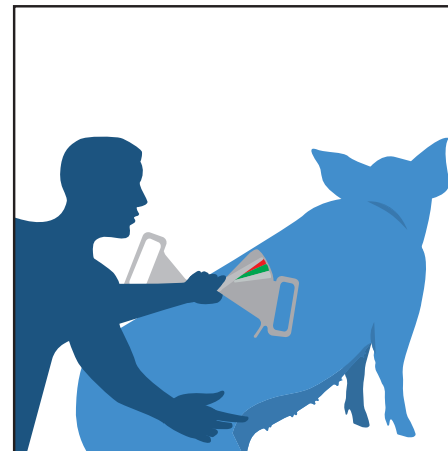


3. Una vez localizada, coloque el calíper a la altura de la última costilla y alinee el perno central del calíper con la columna de la cerda en la última costilla.



4. Sostenga el calíper con una mano alrededor del perno y deje que las puntas del calíper apenas toquen la piel de la cerda. **No presione las puntas del calíper contra la cerda.**

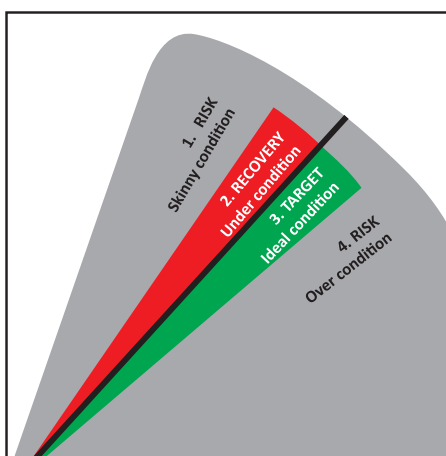

5. Lea y registre las mediciones del calíper.

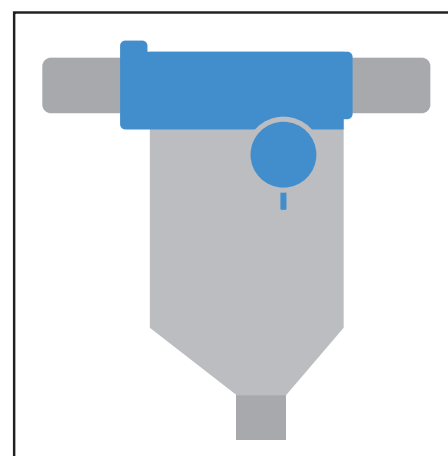

6. Ajuste la alimentación según la lectura del calíper siguiendo las recomendaciones del programa de alimentación PIC.



Escanee para ver el video instructivo